

PRESENTACIONES



1 LITRO

UNIDADES POR EMPAQUE
12 UNIDADES

CPE
0415358977

CODIGO DE BARRAS
7596055000162 (GTIN-13)



3,79 LITROS

UNIDADES POR EMPAQUE
04 UNIDADES

CPE
0415358975

CODIGO DE BARRAS
7596055000063 (GTIN-13)

USOS

Ideal para la esterilización de material médico-quirúrgico, áreas críticas y semicríticas en hospitales, clínicas, laboratorios o cualquier institución que requiera un estricto control microbiológico.

REGISTRO SANITARIO: PMP-47.268

FARMACÉUTICO REPRESENTANTE: Dra. Dayana Del Carmen Linero



VENTAJAS

- ✓ **PODEROSO GERMICIDA MÉDICO - ODONTOLÓGICO**
- ✓ **ELIMINA EL 99,9% DE BACTERIAS, VIRUS, HONGOS Y LEVADURAS**
- ✓ **SEGURO PARA PIEL Y SUPERFICIES**

ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70% + AMONIO CUATERNARIO DE 5TA. GENERACIÓN



MODO DE EMPLEO

Eliminar previamente mediante lavado cualquier suciedad, polvo o materia orgánica, preferiblemente con un detergente neutro. Enjuagar con abundante agua. Aplicar el producto mediante inmersión o aspersión. Dejar actuar por 1 minuto para una desinfección de alto nivel.

RECOMENDACIONES

Bajo un tiempo de contacto de 1 minuto elimina microorganismos como Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Salmonella Typhimurium y Cándida Albicans, así como diversos virus respiratorios como la Influenza y el SARS-CoV-2.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. No mezclar con otras sustancias químicas. Conservar en un lugar fresco, lejos del fuego o altas temperaturas. No ingerir. En caso de ingestión, no inducir el vómito y acudir al médico con la etiqueta del producto. Evitar el contacto con los ojos y mucosas. Si esto ocurre, lavar con abundante agua por varios minutos. Si presenta alguna reacción desfavorable, consultar a su médico.



MÁS SOBRE ESTE PRODUCTO